






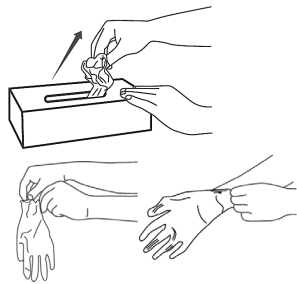
Bruksanvisningen skall användas i kombination med den specifika produktinformation som anges på varje produktförpackning. Handskarna säljs sammanbundna i transportkartongen. Om denna enhet tas isär och produkterna säljs separat, så måste återförsäljaren säkerställa att bruksanvisning medföljer varje separat enhet.

Handskarna är klassade som personlig skyddsutrustning (PPE) kategori III enligt EU-förordningen 2016/425 och överensstämmer med denna förordning genom tillämpliga harmoniserade EUDirektiv. Dessa handskar är avsedda att ge skydd mot förorening från testade specifika kemikalier, mikroorganismer och radioaktiva partiklar (om tillämpligt). Handskarna uppfyller de EN/ISO-krav som anges på varje förpackning. Denna personliga skyddsutrustning är avsedd för engångsbruk och skall kasseras efter användning.

Förklaring av standarder och piktogram

<p>ISO 374-1 Type A / B / C</p>  <p>ABCDEFGHIJKLMNOPST</p>	<p>Genomträngningsnivåer baserade på genombrottstider (testade enl. EN 16523-1:2015+A1:2018) enligt följande:</p> <p>Genomträngningsnivå enl. EN ISO 374-1:2016 +A1:2018</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>30</td> <td>60</td> <td>120</td> <td>240</td> <td>480</td> </tr> </table> <p>Minsta genomträngningstid i minuter</p> <p>Testkemikalier: A = Metanol / B = Aceton / C = Acetonitril / D = Diklorometan / E = Koldisulfid / F = Toluen / G = Dietylamin / H = Tetrahydrofuran / I = Etylacetat / J = n-Heptan / K = Natriumhyd-roxid 40 % / L = Svavelsyra 96 % / M = Salptersyra 65 % / N = Ättiksyra 99 % / O = Ammoniumhydroxid 25 % / P = Väteperoxid 30 % / S = Fluorvätesyra 40 % / T = Formaldehyd 37 %</p>	1	2	3	4	5	6	10	30	60	120	240	480
1	2	3	4	5	6								
10	30	60	120	240	480								
<p>EN ISO 374-4:2019</p>	<p>Nedbrytningen (i %) indikerar ändringen i handskarnas punkteringsmotstånd efter exponering för aktuell testkemikalie.</p>												
<p>ISO 374-5: 2016</p>  <p>Virus</p>	<p>Genomsläpplighet har kontrollerats enligt EN ISO 374-2:2019 Motståndskraft mot intrång av blodburna patogener enligt ASTM F1671/F1671M (virusresistens) Resistens mot bakterier och svampangrepp Resistens mot virusangrepp Genomsläppligheten analyserades under laboratorieförhållanden och gäller bara det testade provet.</p>												
<p>CE XXXX</p>	<p>EN 421:2010</p>  <p>Skydd mot kontaminering från radioaktiva partiklar</p> <p>Dessa handskar skyddar ej mot mekaniska risker.</p>  <p>PPE är för engångsanvändning och får inte användas mer än en gång.</p>												
<p>XXXX = Identifikationsnummer för det anmälda organ som ansvarar för EU-typkontrollen och övervakar den fortsatta överensstämmelsen</p>	 <p>Läs bruksanvisningen upp-märksamt innan handskarna används.</p>												


Hur man tar på sig handskar



Ta ut en handske ur originalförpackningen och kontrollera att den inte är skadad.

Sätt i handen och dra manschetten över handleden tills den sitter ordentligt på plats.

Hur man tar av handskarna

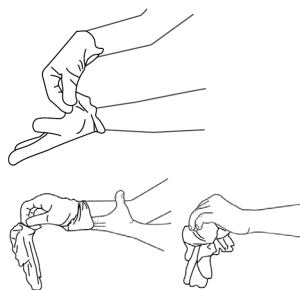

Ta tag i handskens utsida vid handleden. Ta av handsken och vänd den ut och in.

Håll den avtagna handsken i din andra hand. För in fingrarna under handleden på den återstående handsken och ta av den genom att rulla den längs handen och vika in den i den första handsken. Kassera de borttagna handskarna.

Försiktighetsåtgärder för användningen

Innan handskarna används, kontrollera alltid att de inte har mekaniska skador, som till exempel hål eller revor. Använd inte skadade handskar! Handsklängden är anpassad för användning där risken för handleden är minimal.

Anvisningar för förvaring

Förvaringsplatsen skall vara sval, torr och dammfri. Undvik onödigt kraftig ventilation och närhet till fotokopiator. Skydda handskarna mot UV-ljus, solljus och oxideringsmedel. Förvaring vid temperatur över 30 °C vållar snabbare föråldring och måste undvikas. Förvara vid 10° till 30° C torrt och mörkt i originalförpackningen. Skydda mot ozon.

Ingredienser / Riskfyllda beståndsdelar

Vissa handskar kan innehålla beståndsdelar som är kända för att kunna vålla hudirritation eller allergiska reaktioner hos känsliga personer. Kontrollera varningarna på den berörda förpackningen. Receptet kan erhållas på begäran.

Anvisningar för avfallshantering efter användning

Omhänderta enligt gällande föreskrifter för handskmaterialet. Handskar som förorenats av kemiska ämnen måste tas om hand enligt föreskrifter för berörda kemikalier.